

palajet® HANDLING GUIDELINE


Vorbereitung und Anwendung




1. Nehmen Sie alle Bestandteile aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.




2. Hängen Sie das Batteriepack auf und lösen Sie nach Bedarf den Absaugschlauch vom Spülschlauch.

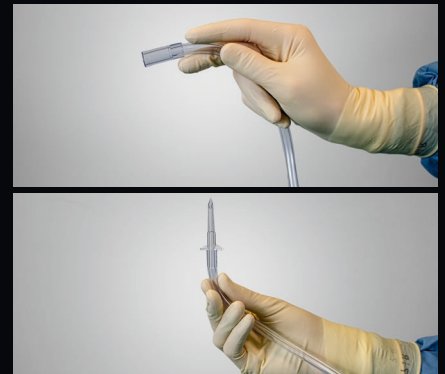

3. Schließen Sie den Absaugschlauch an die Absaugvorrichtung an. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Spülschlauch und verbinden Sie diesen mit der Spülflüssigkeit.

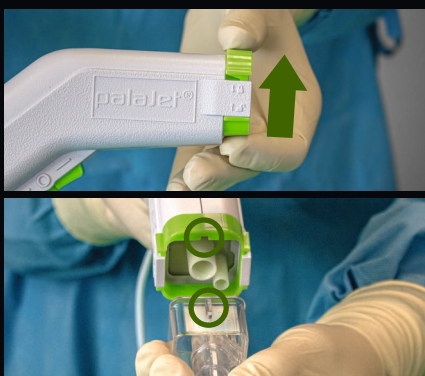


4. Schieben Sie die grüne Verriegelung am Handstück nach oben und setzen Sie den gewählten Aufsatz mit dem Steg nach oben ein. Drücken Sie die Verriegelung anschließend wieder nach unten.

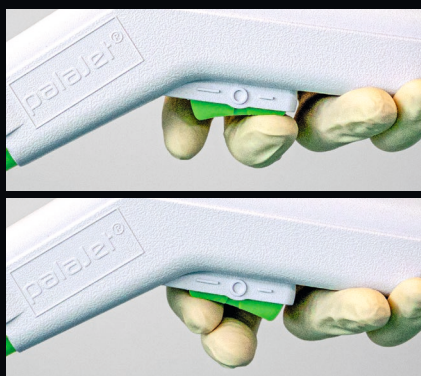

5. Betätigen Sie den Schalter am Handstück, um den Spülvorgang zu starten. Sie können zwischen den folgenden Einstellungen wählen:

- kurzer Strich = niedriger Spüldruck
- Kreis = Spülstopp
- langer Strich = hoher Spüldruck

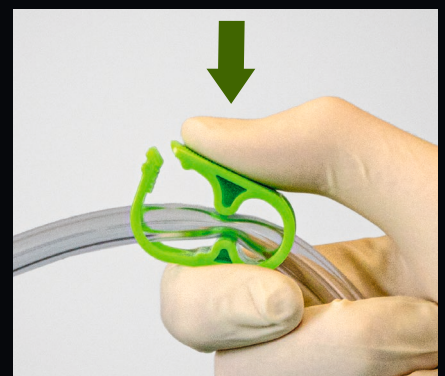

6. Optional: Mithilfe der Klemmen an Spül- und Absaugschlauch können Sie die Durchflussrate bzw. Absaugung zusätzlich regulieren.
Grüne Klemme = Absaugschlauch
Blaue Klemme = Spülschlauch


palajet®

HANDLING GUIDELINE


Nach der Anwendung




1. Beenden Sie die Anwendung, indem Sie den Schalter am Handstück auf die Stopp-Position „O“ stellen und schalten Sie die Absaugvorrichtung aus.

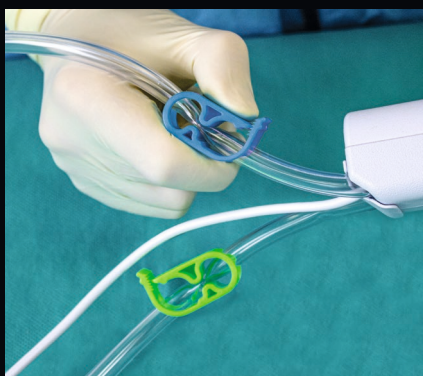

2. Schließen Sie die Klemmen am Spül- und Absaugschlauch, um den Rückfluss von Flüssigkeiten zu vermeiden.

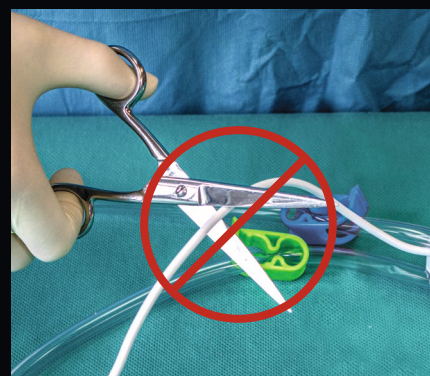

3. **ACHTUNG: Kurzschluss-Gefahr!** Schneiden Sie das Kabel zum Batteriepack NICHT durch.

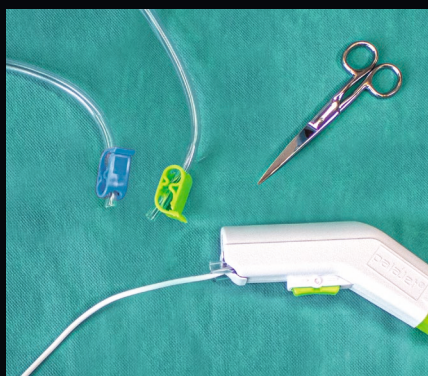

4. Schneiden Sie die Schläuche ab.



5. Öffnen Sie das Batteriepack, indem Sie eine der zwei seitlichen Laschen drücken und den Deckel abschieben.



6. Ziehen Sie das Batteriebündel heraus. Entnehmen Sie die Batterien und entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß.

